

BACTICID AF

Rýchla dezinfekcia na povrchy

- Rýchly alkoholový dezinfekčný prostriedok
- Pre profesionálne použitie so širokým spektrom účinnosti
- Vhodný aj pri zvýšených hygienických požiadavkách

Bacticid AF je rýchly alkoholový dezinfekčný prostriedok určený pre neinvazívne zdravotnícke pomôcky a povrchy, ktoré sú odolné voči alkoholom. **Bacticid AF** je vhodný hlavne pri zvýšených hygienických požiadavkách, kedy je potrebná rýchla a pravidelná dezinfekcia povrchov.

OBLASTI POUŽITIA

Nemocnice a ostatné zdravotnícke zariadenia, operačné sály, jednotky intenzívnej starostlivosti, dialyzačné strediská, ambulancie, laboratória, domovy sociálnych služieb, potravinársky, farmaceutický a kozmetický priemysel, atď.

POUŽITIE

Bacticid AF je pripravený na okamžité použitie. Aplikuje sa na povrch nastriekaním alebo nanosením na handričke z netkaného textilu.

Pri aplikácii nastriekaním sa odporúča vzdialenosť od povrchu aspoň 30 cm a zotretie handričkou. Pri ťažko dostupných miestach sa odporúča ich úplné pokrytie. Povrch musí zostať viditeľne zvlhčený minimálne 30 sekúnd pre dosiahnutie účinku.


ZLOŽENIE

Obsahuje účinné látky: 57 g etanol, 6 g izopropanol.



UPOZORNENIA

Horľavá látka. Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Uchovávať na dobre vetranom mieste. Uchovávať v chlade. Noste ochranné rukavice. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s predpismi o nebezpečnom odpade alebo obale, a o odpade z obalov.

Zdravotnícka pomôcka triedy IIa. **Kód ŠŮKL: P 0951A.**  0537

Výrobok je určený pre profesionálne použitie.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Objem	Balenie	Katalógové číslo
1 l	s rozprašovačom	551020071
5 l	kanister	551020070

ÚČINNOSŤ	Metóda testovania	Expozičný čas
Baktericídna: (vr. MRSA, VRE)	EN 13727, EN 14561, EN 13697	30 sekúnd
Levurocídna: Candida albicans	EN 13624, EN 14562, EN 13697	30 sekúnd
Mykobaktericídna: (M.Avium, M.Terrae)	EN 14348, EN 14563	30 sekúnd
Vírusy: BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Rotavírus, Norovírus	EN 14476	15 sekúnd
Vírusy: Adenovírus	EN 14476	30 sekúnd
Vírusy: Poliovírus	EN 14476	120 sekúnd