

Sterisept Ready to Use

Dezinfekčný a čistiaci prostriedok

na zdravotnícke pomôcky bez obsahu alkoholu

VIDRA A SPOL.
S.R.O.

VŽDY POMŔEME

- Bez obsahu alkoholov, aldehydov, fenolov a polyhexanidu
- Výborná materiálová kompatibilita
- Vhodný aj pre povrchy citlivé na alkoholy
- 2 v 1 - čistenie a dezinfekcia v jednom kroku

Sterisept Ready to Use je rýchly dezinfekčný prípravok bez obsahu alkoholu určený pre invazívne a neinvazívne zdravotnícke pomôcky a povrchy citlivé na alkoholy. Je vhodný pre všetky povrchy odolné proti vode v zdravotníckej oblasti. Vďaka špeciálne vyvinutému zloženiu má dobrú materiálovú kompatibilitu spolu s dobrými čistiacimi vlastnosťami.

Sterisept Ready to Use je tiež vhodný na predbežnú dezinfekciu a zvlhčenie kontaminovaných chirurgických nástrojov a má dobrú materiálovú kompatibilitu s povrchmi a nástrojmi. Takáto predsterilizačná príprava chirurgických nástrojov je dôležitým krokom na zabezpečenie účinného a bezpečného postupu sterilizácie. Pomáha redukovať mikrobiálnu kontamináciu a tiež odstraňuje krv, tkanivo a iné organické reziduá z nástrojov.

OBLASTI POUŽITIA

- Invazívne a neinvazívne zdravotnícke pomôcky
- Povrchy v blízkosti pacienta ako rám postele a stolíky
- Vyšetrovacie lôžka a matrace
- Operačné stoly a okolité pracovné povrchy
- Ambulancie a fyzioterapie
- Inkubátory, vane a vozíky
- Displeje, klávesnice a kontrolné panely

ÚČINNOSŤ	Metóda testovania	Kontaktný čas
	EN13727	
Baktericídna (vrátane MRSA, VRE)	EN14561 EN13697	1 min.
Levurocídna	EN13624 EN13697	1 min.
Všetky obalené vírusy	EN14476	0,5 min.
Rotavírus, Norovírus	EN14476	0,5 min.
Mykobaktericídna	EN14348	5 min.
Asbergillus brasiliensis	EN13624	10 min.
Clostridium difficile	EN13704	15 min.



POUŽITIE

Aplikujte na povrchy pomocou utierky alebo nastriekaním. Zabezpečte kompletné pokrytie.

Povrch dezinfikovaný pomocou utierky: Aplikujte potrebné množstvo Sterisept Ready to Use na vhodnú jednorazovú utierku z netkanej textílie a zotrite povrch.

Dezinfekcia povrchu nastriekaním: Nastriekajte Sterisept Ready to Use na povrch vo vzdialenosti najmenej 30 cm a zotrite ho utierkou. Odporúčané pre dosiahnutie ťažko dostupných povrchov.

Predsterilizačná príprava chirurgických nástrojov: po použití a rozobratí nástrojov ich umiestnite do nádoby alebo kontajnera, nastriekajte Sterisept Ready to Use na kontaminované nástroje ako prevenciu pred rastom mikróbov a pred zaschnutím nečistôt na nástrojoch. Pokračujte ďalšími krokmi reprocessingu.

ZLOŽENIE

100 g produktu obsahuje účinné látky:

0,45 g Didecyl-Dimethyl-Ammonium Chloride (DDAC),
0,45 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

Zdravotnícka pomôcka triedy IIb. **Kód ŠÚKL: P 0955A.**



Výrobok je určený pre profesionálne použitie.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Objem	Balenie	Katalógové číslo
1 l	s rozprašovačom	551020072
5 l	kanister	551020073

